



Hallux Valgus Druckschutz Plus

UVP*: 4.99 EUR

Stand: 10.9.2026

Das Wichtigste in Kürze:

- Anpassbare Zehenspreizung
- Für schmerzfreies Gehen
- Optimaler Tragekomfort
- Wiederverwendbar und waschbar

Eigenschaften:

tetesept Hallux Valgus Druckschutz Plus sorgt für sofortige Schmerzlinderung bei Ballenzehen. Das weiche und flexible Material der Gelpolster passt sich ideal dem Fuß an und mindert den Druck ohne den Fuß im Schuh einzuengen. Es kann sowohl am linken als auch am rechten Fuß getragen werden. Die anpassbaren Zehenspreizer in zwei Härtegraden wirken dem Schiefstand der großen Zehe entgegen und bieten die Möglichkeit, je nach Zehenschiefstand und Belastung, die Druckentlastung individuell anzupassen und schmerzfreies Gehen zu ermöglichen.

WAS IST HALLUX VALGUS?

Hallux Valgus, eine Schiefstellung der Großzehe, kann aufgrund von Vererbung oder auch durch das Tragen von zu engen oder hohen Schuhen vorkommen. Eine schnelle Abhilfe bietet dabei die Druckentlastung durch den tetesept Hallux Valgus Druckschutz Plus.

Anwendung & Hinweise:

Ziehen Sie das Gelpolster an und bringen Sie es in eine angenehme Position. Die druckempfindliche Hallux Valgus Stelle sollte dabei vom seitlichen Polster bedeckt werden. Wählen Sie den Zehenspreizer mit passendem Härtegrad aus

und schieben Sie diesen in die Aussparung des Gelpolsters zwischen den beiden Zehen.

Es wird empfohlen den Hallux Valgus Druckschutz Plus nach der Anwendung, gründlich mit Wasser zu waschen. Sollte sich der Druckschutz klebrig anfühlen, kann er mit Puder bestäubt werden.

Zusammensetzung:

-

Handelsform:

2 Gelpolster + 4 Zehenspreizer

GTIN:

4008491109291

PZN:

16945263