



Warzen Vereiser

UVP*: 17.99 EUR

Stand: 10.9.2026

Das Wichtigste in Kürze:

- Wirksame Warzenentfernung für Hand- und Fußwarzen
- Effektiv ab 1. Anwendung
- Einfach anwendbar und schnell wirksam
- Auch für Kinder ab 4 Jahren

Eigenschaften:

Der tetesept Warzen Vereiser für Hand- und Fußwarzen basiert auf der von Allgemeinmedizinerinnen verwendeten Vereisungstechnologie. Er bietet eine punktgenaue Entfernung von Warzen und Warzenherden durch direktes und präzises Einfrieren. Durch die Vereisung wird die Warze oder der Warzenherd in der Regel nach einer Anwendung verschwinden.

Anwendung & Hinweise:

SCHRITT 1:

Nehmen Sie den Stift in die Hand und halten Sie ihn nach unten. Drücken Sie 5 mal fest auf die Logos der seitlichen Tasten. Die Metallschaumspitze wird mit kalter Flüssigkeit durchtränkt und Kondensation wird sichtbar (frostiges Aussehen).

SCHRITT 2:

Drücken Sie die Metallschaumspitze maximal 20 Sekunden lang leicht auf die zu behandelnde Warze. Bei Fußwarzen, an Stellen mit dickerer oder schwieliger Haut, wie dem Fußballen oder der Ferse, halten Sie die Metallschaumspitze 40 Sekunden lang auf die Warze. Sie könnten ein schmerzendes und/oder juckendes

und/oder stechendes Gefühl verspüren, welches auch noch für einige Zeit nach der Behandlung anhalten kann. Die Haut kann sich vorübergehend weiß verfärben.

SCHRITT 3:

Wenn die Warze oder ein Teil der Warze nach 8-12 Tagen nach der ersten Anwendung noch da ist, kann die Behandlung wiederholt werden. Bei Warzen die dicht beieinander liegen (d. h. ein Cluster bilden) warten Sie ebenfalls 8-12 Tage, bis Sie eine erneute Behandlung durchführen. Die Behandlung kann 3 mal wiederholt werden.

Der Warzen Vereiser kann von Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren verwendet werden. Erwachsene sollten die Behandlung bei Kindern durchführen. Verwenden Sie den Warzen Vereiser nur direkt auf der Warze. Bei der Anwendung auf gesunder Haut oder auf der die Warze umgebenen Haut, kann ein Stechen, leichtes Brennen oder ein schmerzhaftes Gefühl an der behandelten Stelle auftreten, was zu brennenden Wunden, Hautschäden oder Narben führen kann.

Zusammensetzung:

Vereisungsmittel: 1,1-Difluoroethane, Propane, Isopentane

Handelsform:

15ml Vereisungsmittel

GTIN:

4008491109444

PZN:

19065545